

胃瘻評価スケール

【原因区分】漏れ：M ストッパー：S チューブ：T

PEG:No		氏名	造 設 日
			最 終 交 換 日
特 記 事 項		使用キットの種類	
観 察 項 目	評価点数	評 価 段 階	
カテーテル の状態	0	汚れなく変形もなし	
	1	汚れはあるが変形はなし	
	2	汚れがあり変形している (a:チューブ b:逆止弁 c:キャップ)	
	3	閉塞している・破損している (a:チューブ b:逆止弁 c:キャップ)	
漏れの状態	0	なし	
	1	時々漏れる (体位により漏れる etc.)	
	2	必ず漏れる	
老廃物付着 の状態	0	なし	
	1	少量の汚染がある (容易に除去できる)	
	2	多量の汚染がある (除去困難)	
皮 膚 の 状 態	発 赤	0	なし
		1	軽度の発赤がある (乾燥している)
		2	重度の発赤がある (湿潤・浸出液がある)
	硬 結 (しこり)	0	なし
		1	痛みを伴わない硬結がある
		2	痛みを伴う硬結がある
	湿 疹	0	なし
		1	あり
	水 疱	0	なし
		1	破れていない水疱がある
		2	破れている水疱がある
	び らん 潰 瘍	0	なし
		1	びらん
		2	潰瘍
		3	壊死
	肉 芽	0	なし
		1	乾燥していて浸出液がなく色調に赤みなし (良性)
		2	上記に加えて、赤みがある
		3	色調の変化と共に湿潤・浸出液がある
		4	上記に加えて、出血がある
5		膿様の浸出液がある	

*「胃瘻評価スケール」は、造設2週間以降の胃瘻患者さんを評価対象としています。

参考文献：胃ろう (PEG) ケアはじめの一步

監 修：滋賀PEGケアネットワーク

改 訂 日：2012年5月