


# 胃瘻評価スケールに基づく胃瘻ケアフローチャート

\*「胃瘻評価スケールに基づく胃瘻ケアフローチャート」は、造設2週間以降の胃瘻患者さんを評価対象としています。

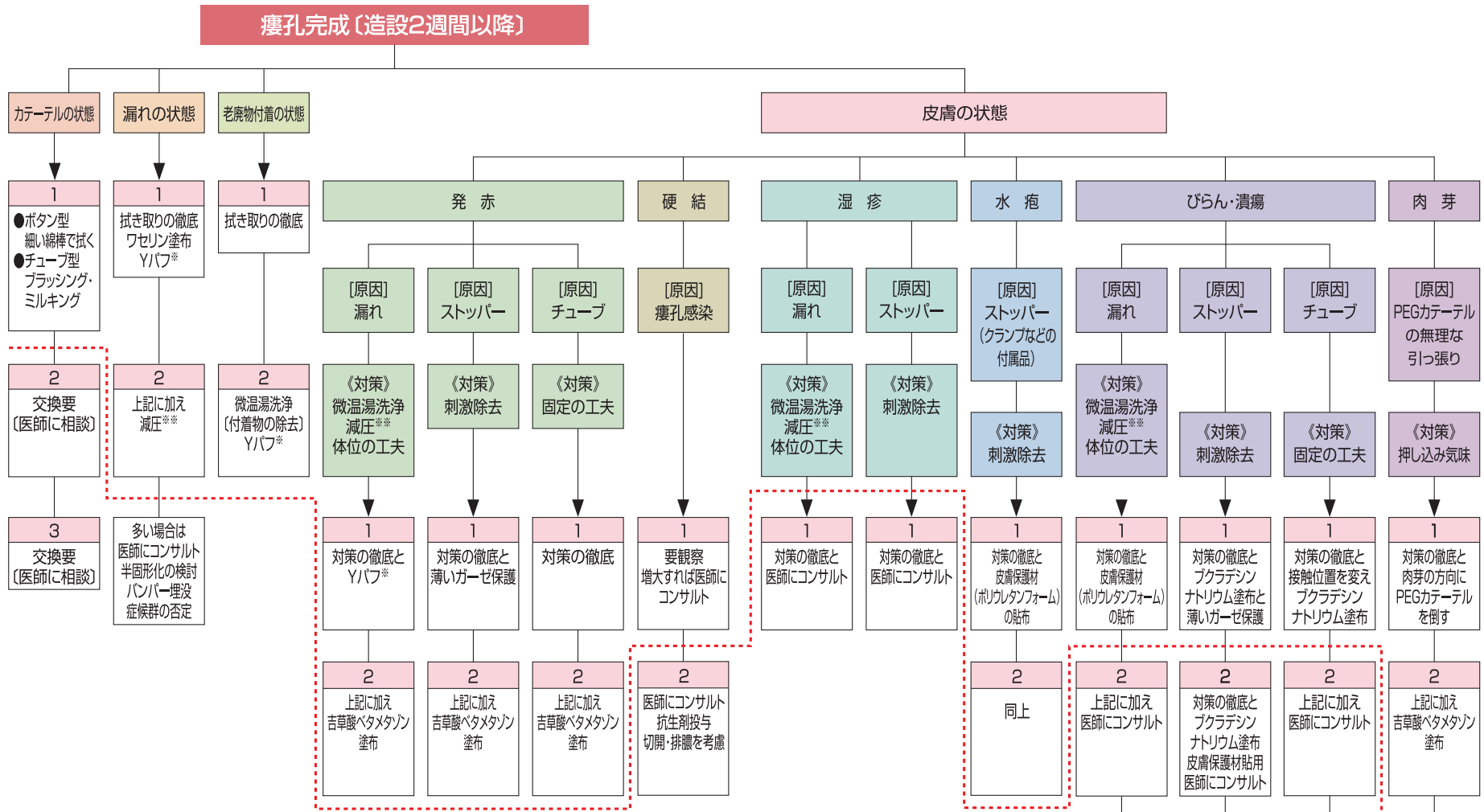

- 基本ケア (2~3回/1日)**
1. 微温湯で濡らした布 (ガーゼ) による拭き取り
  2. 外部ストッパーの位置を変える (PEGカテーテルを回転・上下動させ外部ストッパーの位置を変える)
  3. 外部ストッパーを押し込み気味にする (PEGカテーテルの無理な引っ張りを避ける)
- 2・3が瘻孔部への刺激 (摩擦・圧迫) の除去となります。

- 漏れ、浸出液に対するケア (Yパフ\*、Yティッシュ\*、ティッシュこより)**
- 汚染時は必ず交換
  - ティッシュこよりは外部ストッパーと皮膚との距離が10mm以上無ければ禁忌
  - 出血を伴っている場合は、ガーゼこより、切り込み入りガーゼを使用
- ※使い捨ての化粧パフ及びティッシュに切り込みを入れたものを使用します。

- 減圧\*\* (ガス抜き)**
- 注入前に空のカテーテルチップをつなぎ、胃内を確認します。
- 塗り薬の使用注意事項**
- 漏れや浸出液が多い場合はクリームタイプを使用します。
- ※前回の塗り薬はしっかり洗浄・拭き取り後に塗布する

より下が 医師にコンサルトが必要

参考文献: 胃ろう (PEG) ケアははじめの一步  
監修: 滋賀PEGケアネットワーク  
改訂日: 2012年5月