

StatLock® CV

Stabilization Devices.

中心静脈カテーテル専用固定器具



■スーチャーフリー Securement Device

- 縫合による感染リスクを低減します
- 針刺しを予防します

〔成人用〕



販売名：スタットロック

カタログ番号	仕様	包装単位
CV0220CE	CV	25入

届出番号：27B1X00052000007


〔小児用〕



販売名：スタットロック

カタログ番号	仕様	包装単位
VCDPP	CV小児用	25入

届出番号：27B1X00052000007

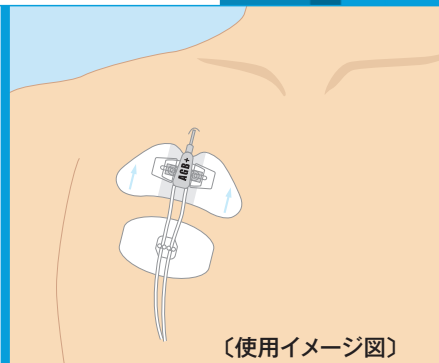

〔使用イメージ図〕

貼り付け手順 (内頸静脈挿入CVカテーテルへの成人用使用例)



1 アルコール綿等により固定する部位を清拭した後、前処置剤をスタットロック及びセカンドパッドの貼り付け部位の皮膚に広めに塗布し、完全に乾燥させます。(通常10~15秒間)
*前処置剤の使用により皮膜をつくることで皮膚を保護します。



2 パッドの矢印が皮膚刺入部に向くようにカテーテルと体表の間に位置させ、カテーテルのスーチャーホールにリテイナーの各突起をはめ込み、さらにカバーを開けて取り付けます。




3 パッドの表紙を片側からゆっくりと剥がして、パッドを皮膚に貼り付けます。必要に応じて、滅菌テープにて固定します。
*カテーテルにリテイナーを取り付けるまでは、パッドの裏紙を剥がして皮膚に貼り付けないでください。



4 必要に応じてカテーテルのエクステンションチューブをセカンドパッドに取り付けて皮膚に貼り付けます。透明ドレッシング材等を皮膚刺入部を中心に貼り付けて保護します。

セカンドパッドへの取り付けと取り外し

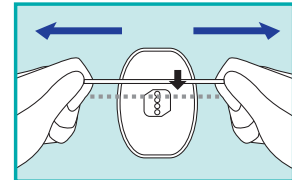

エクステンションチューブを左右に引っ張りながら取り付けます。また、取り外しの際も同様にチューブを左右に引っ張りながら外します。
*セカンドパッドに取り付け可能なエクステンションチューブの外径は0.09インチ(約2.3mm)以下です。

取り外し手順



1 透明ドレッシング材等を注意深く剥がし、必要に応じてテープでカテーテルの刺入部付近を仮留めしておきます。



2 リテイナーのカバーの下端を持ち上げるようにして開け、カテーテルをリテイナーの突起から取り外します。



3 アルコール綿等でパッドの端を浸潤させて持ち上げ、その後、さらに粘着面を浸潤させながらゆっくりと剥がしていきます。同様にセカンドパッドも取り外します。

ご使用にあたっての注意

スタットロックの使用中は、固定状態を毎日観察し、パッドの剥がれ、破損、汚損等の異常が認められる場合、あるいは医師、看護師等の医療従事者が必要と判断する場合には本品を新しいものに交換してください。また、少なくとも7日毎に本品を新しいものに交換してください。

※事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※Bard、パード、StatLock、スタットロックは、C. R. Bard社の登録商標です。

販売名：スタットロック
届出番号：27B1X00052000007
クラス分類：[1]一般医療機器
一般的名称：カテーテル固定用パッチ

セット内容

