



皮下埋込型ポート用ヒューバー針

# Huber Plus

ヒューバープラス

植込みポート用医薬品注入器具

～シンプルな構造により  
簡単な操作が可能～



# Huber Plus ヒューバー針

## 特徴と利点


### 使いやすいデザイン

- 片手操作で安全機構の作動が可能
- 陽圧下抜針や腕留置した患者にも対応可能

### 安全性について

- チューブの素材にDEHP及びラテックスを使っていません。  
(DEHP=フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)
- ノンコーティング針

チューブごと把持します。

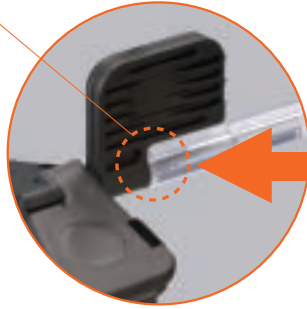

### 穿 刺



親指と中指でチューブごとフィン状グリップを把持し、人差し指をウイング前方のパッド部の上に置いて穿刺します。



穿刺が完了したら、フィン状グリップを倒し、ドレッシング材で全体を覆います。

### 抜 針



親指と人差し指の関節内側でウイングの両サイドを把持します。



ウイング部の両サイドを締めつけます。



パチッと音がするまでウイング部を完全にたたみ込みます。

### 廃 棄



そのまま医療鋭利物容器へ廃棄できます。

## ORDERING INFORMATION

ヒューバープラス

カタログ番号	規 格	カラー	包装
8012005	20G 12.7mm	黄	25入
8012034	20G 18.8mm		
8012001	20G 21.6mm		
8012205	22G 12.7mm	黒	
8012234	22G 18.8mm		
8012201	22G 21.6mm		

販 売 名：ヒューバープラス  
 認 証 番 号：228ADBZX00016000  
 クラス分類：[2]管理医療機器  
 一般的名称：植込みポート用医薬品注入器具  
 償 還 区 分：在宅中心静脈栄養用輸液セット 付属品 フーバー針

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。  
 ・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。  
 ・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

**株式会社メディコン**

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8  
 ☎06(6203)6541(代)

